



INSTRUKCJA OBSŁUGI

fotel sanitarny

Model OPEN

niebieski, bordo, cactus, terracota
z regulacją wysokości – ocean i bordo

Użytkowanie:

Umieścić pojemnik na przeznaczonych do tego zaczepach pod siedziskiem. Można to zrobić z boku, po obu stronach, lub z góry, po podniesieniu siedziska w kierunku „do tyłu” obracając je na dwóch plastikowych klipsach osadzonych na metalowej konstrukcji fotela. Dla celów higienicznych siedzisko ma też możliwość zdejmowania – ułatwia to czyszczenie czy dezynfekcję fotela. Podczas używania jako normalny fotel otwór w siedzisku przykryć pokrywą. Modele z regulacją wysokości – wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie!!

Czyszczenie i utrzymanie:

Czyścić regularnie, używając łagodnych środków czyszczących posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych! Wysuszyć przed użyciem. Zachować ostrożność wyjmując pojemnik bokiem, aby uniknąć kontaktu z genitaliami.

Material:

PVC, wewnątrz gąbka, konstrukcja stalowa malowana proszkowo.

Maksymalna waga użytkownika: 130 kg

Wyprodukowane przez: HERDEGEN Paris -
Francja

DYSTRYBUTOR:

ASTON sp. z o.o.

ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01